


 Packungsbeilage / Gebrauchsinformation

ROGG-Silikon ES

ROGG-Silikon ES ist eine hoch flexible, sterile primäre Wundauflage, bestehend aus 100% Silikon.

ROGG-Silikon ES Wundauflagen eignen sich ideal für die Behandlung von oberflächlichen Wunden mit mäßiger bis geringer Exsudation, auch nach plastischer Chirurgie und zur Verminderung der Narbenbildung.

Eigenschaften:

- Gas- und exsudatdurchlässig
- Ständige Wundbeobachtung durch transparente Auflage möglich
- Atraumatische Kanten
- Längs- und querelastisch
- Passt sich schwierigen Wundkonturen an
- Entfernung der Wundauflage ohne Schmerzen und Wundirritation möglich
- Hypoallergen

Indikation:

- Zur Abdeckung von traumatische Wunden, z. B. Schnitt- und Schürfwunden
- Zur Abdeckung von thermische Wunden, z. B. Verbrennungen ersten und zweiten Grades.
- Zur Abdeckung von postoperative Wunden
- Zur Abdeckung von vorgeschädigte Haut (z.B. Cortisonhaut, Altershaut)
- Versorgung von Hauttransplantaten und -entnahmestellen
- Plastische Chirurgie

Kontraindikationen:

- Nicht bei infizierten Wunden einsetzen

Anwendungshinweise:

- Wunde reinigen
- Wundumgebung reinigen, sorgfältig trocknen, Wundrandschutz vornehmen
- ROGG-Silikon ES aus der sterilen Einzelpackung entnehmen
- Unter Beachtung aseptischer Techniken direkt auf den Wundgrund einlegen, den Wundrand 1 bis 2 cm überlappen lassen. Bei Bedarf können auch mehrere ROGG-Silikon ES Wundauflagen nebeneinander platziert werden.
- Bei Bedarf wird die Wunde mit einem Sekundärverband abgedeckt und fixiert.
- Sollte die Absorptionskapazität des Sekundärverbandes erreicht sein, so ist dieser zu wechseln. ROGG-Silikon ES sollte nicht länger als 3 Tage auf der Wunde verbleiben.
- ROGG-Silikon ES lässt sich beim Verbandwechsel schmerzfrei entfernen.

Packungsgrößen:

REF	21031	PZN 923 2321	5 cm x 7,5 cm,	5 Stück
REF	21032	PZN 923 2338	10 cm x 10 cm,	5 Stück
REF	21033	PZN 923 2344	10 cm x 20 cm,	2 Stück


 0124


+5°C / +25°C



Latexfrei Rücknahmesystem



STERILE R