

ROGG

Wund- und Brandsalbe



GEBRAUCHSANWEISUNG

Schmerzlindernd bei Verbrennungen I. und II. Grades

ROGG Wund- und Brandsalbe ist ein Medizinprodukt zur äußerlichen Anwendung für die Heilung von Verletzungen der Haut.

- Fördert die Wundheilung
- Reduziert die Schwellung
- Mindert den Schmerz
- Reduziert die Narbenbildung
- Beugt Infektionen vor

Anwendungsgebiete:

Verletzungen der Haut (z.B. Schnitt-, Schürf-, Riß- und Quetschwunden), Verbrennungen 1. und 2. Grades (auch Sonnenbrand), zur Behandlung von Narbengewebe und stumpfen Traumen.

Eigenschaften:

Die **ROGG Wund- und Brandsalbe** dient zur Einstellung eines optimalen physikalischen Milieus zur Heilung verletzter Haut.

Dadurch werden Blutergüsse und Ödeme beschleunigt abgebaut, die Schwellung reduziert und damit die Schmerzen gelindert. Die Neubildung von Gewebe wird unterstützt, die Heilung nach Operationen oder Verletzungen (Wunden, Verbrennungen, Sonnenbrand) verbessert und die Narbenbildung verringert.

Anwendung:

ROGG Wund- und Brandsalbe ca. 2 mm dick auf die verletzte Haut bis ca. 2 cm über die Wundränder hinaus auftragen. In den ersten drei Tagen nach der Verletzung mehrmals täglich anwenden.

ROGG Wund- und Brandsalbe kann auch in Verbindung mit einem üblichen Verbandstoff angewandt werden. Durch das Abdecken der verletzten Haut mit einem Verbandstoff wird die Wunde zusätzlich vor äußeren Einflüssen geschützt, die die Heilung stören könnten.

ROGG Wund- und Brandsalbe enthält keine hautreizenden Substanzen und kann im Mund- und Schleimhautbereich angewendet werden.

ROGG Wund- und Brandsalbe ist zur Iontophorese geeignet. Sie wird unter der Anode aufgetragen.

Dauer der Anwendung:

Die Anwendung richtet sich nach Art und Schwere der Verletzung.

Gegenanzeigen und Nebenwirkungen:

Gegenanzeigen und Nebenwirkungen sind keine bekannt. Bei bekannter Allergie oder Verdacht allergischer Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe sollte das Produkt nicht eingesetzt werden.

Inhaltsstoffe:

INCI-Liste

Trace Element Solution (Zinc, Iron, Aqua purificata), Octyldodecanol, Hydrogenated Palm Glycerides, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Cetyl Alcohol, Methylparaben (and) Sorbic Acid (and) Dehydroacetic Acid (and) Propylparaben, Disodium EDTA.

Packungsgrößen:

Tube zu 100 g


Sicherheitshinweise:

Zur äußerlichen Anwendung. Auf hygienische Entnahme achten. Vor Frost und Hitze schützen. Tube nach Gebrauch verschließen. Verfalldatum siehe Faltschachtel und Tubenfalz. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden. Auf unbeschädigte Versiegelung achten.

Aufbrauchfrist:

3 Monate nach Anbruch der Tube

	ROGG Wund- und Brandsalbe 100 g
REF:	36021
PZN:	9230888

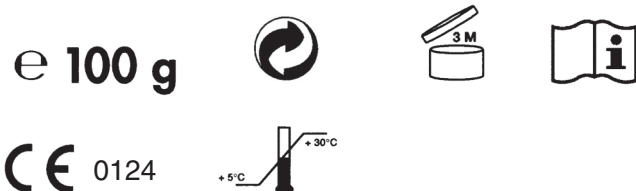

Stand: 2011-09-15



ROGG Verbandstoffe GmbH & Co. KG

Postfach 1243 · 85379 Eching · Tel. (0 81 33) 93 20-0 · Fax (0 81 33) 93 20-25
www.rogg-verbandstoffe.de · info@rogg-verbandstoffe.de